

MASQUES HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES

UNE 0065:2020

Masques hygiéniques réutilisables, est un produit d'usage personnel, couvrant la bouche, le nez et le menton, muni d'un harnais pour entourer les oreilles. Ils sont fabriqués avec du matériel réutilisable et permettent la respiration.

Masque conçu pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans.

CARACTÉRISTIQUES

- Taille recommandée pour l'utilisation d'un adulte.
- Dimensions 180x95 mm.
- Matériel du corps du masque:
TST 50 gr/m² (100% Polypropylène).
- Matériel des bandes élastiques:
50% Polyester / 50% Latex.
- Fixation à la tête par deux bandes élastiques situées sur les deux extrémités supérieure et inférieure.

APPROBATIONS

UNE 0065:2020 sur les Masques hygiéniques réutilisables pour adultes et enfants.

Le masque peut supporter de 5 à 7 cycles de lavage à plus de 60 °C (UNE-EN ISO 6330 programme 6N) et séchage à l'air (UNE-EN ISO 6330:2012, type A) tout en conservant ses performances.

Critères d'acceptation pour les masques hygiéniques réutilisables (en utilisant les essais de la norme UNE-EN 14683):

ESSAI

Efficacité de filtration. (%) (Essai BFE)

Testée au moyen d'un test d'efficacité de filtration bactérienne (BFE),(%)
(paragraphe 5.2.2 de la norme UNE-EN 14683:2019+AC:2019)


Respirabilité (Pression différentielle), (Pa/cm)

(paragraphe 5.2.3 de la norme UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Critères d'acceptacion


≥ 90

< 60

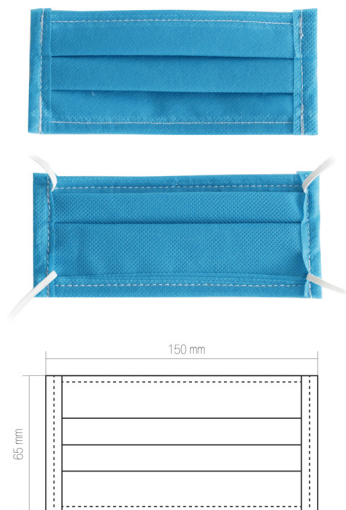

AVERTISSEMENTS

Ce dispositif n'est pas un dispositif médical (PS) au sens de la directive 93/42 ou du règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du règlement UE/2016/425.

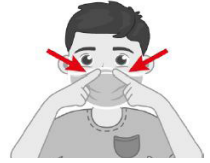

MISE EN PLACE DU MASQUE

Il est recommandé de placer le masque sur la peau nue (c'est-à-dire sans la présence de cheveux en contact avec la peau de l'utilisateur et, pour certaines personnes, peau rasée) et de respecter les étapes suivantes :

1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou les frotter avec une perfusion hydroalcoolique avant de manipuler le masque.
2. Identifier le haut du masque. Bande élastique plus longue.
3. Placer le masque sur le visage, au niveau du nez.
4. Tenir le masque de l'extérieur et tenir le harnais derrière.
5. Abaissez le bas du masque au menton.
6. Vérifier que le masque couvre le menton.
7. Vérifier que le masque est correctement placé. Pour cela, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité et l'absence de gêne respiratoire.
8. Une fois ajusté, ne pas toucher le masque avec vos mains. Si l'utilisateur doit toucher le masque, il doit d'abord se laver les mains à l'eau et au savon ou les frotter avec une solution hydroalcoolique.

RETRAIT DU MASQUE

Pour éviter la contamination lors du retrait d'un masque, les étapes suivantes doivent être suivies:

1. Retirer les gants de protection.
2. Se laver les mains à l'eau et au savon ou les frotter avec une solution hydroalcoolique.
3. Retirer le masque sans toucher l'avant du masque.
4. Se laver les mains à l'eau et au savon ou les frotter avec une solution hydroalcoolique.



Scanner le code QR pour plus d'informations sur les masques.

LAVAGE DU MASQUE

- Un cycle complet de lavage (humidification, lavage, rinçage) doit être effectué avec le détergent habituel à une température de lavage de 60 °C.
- Éviter tout contact entre un masque sale (à laver) et des vêtements propres. La personne responsable du lavage doit se protéger contre les masques sales.
- Les produits qui peuvent dégrader ou endommager les matériaux et qui diminuent leur capacité protectrice ne doivent pas être utilisés.
- Il est recommandé de sécher complètement le masque dans les 2 heures qui suivent le lavage. Ne pas sécher ou hygiéniser avec un four à micro-ondes.
- Pendant le séchage et lors du stockage ultérieur du masque, il faut éviter les environnements dans lesquels le masque peut être à nouveau contaminé.
- Après chaque cycle de lavage, une inspection visuelle (avec gants de protection ou mains lavées) doit être effectuée. Si le masque est endommagé (réglage réduit, déformation, usure, etc.), il doit être jeté.



SUPPRESSION DU MASQUE

Afin de réduire les risques liés à l'utilisation de ces masques, il convient de les jeter après cinq à sept cycles de lavage.

PROCÉDURE D'ÉLIMINATION

Les masques doivent être jetés dans un récipient muni d'un sac en plastique (de préférence muni d'un couvercle et d'un contrôle non manuel). Il est recommandé d'utiliser un double sac pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur.

